

SECUREGARD™

fecskendőrendszer visszahúzzható tűvel

SecureGard fecskendőrendszer visszahúzzható tűvel. Kezelése egyszerű, segít minimalizálni a véletlenül bekövetkező szúrásos sérülések kockázatát.

Securegard fecskendő visszahúzzható tűvel.




A tű visszahúzása a fecskendőhengerbe.



A tű biztonságosan fekszik a hengerben.



A dugattyúszár letörésével ártalmatlanná válik a fecskendő.

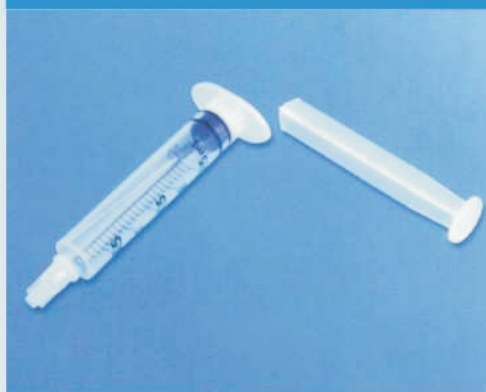

● technikai változtatás nélkül

● latexmentes kivitel

● kézi visszahúzás

● minimális tréningsszükséglet

● megoldás alacsony költség szinten


● letörhető dugattyúszár

SAFEGARD
Medical

SECUREGARD™

fecskendőrendszer visszahúzzható tűvel

A fecskendő használata:

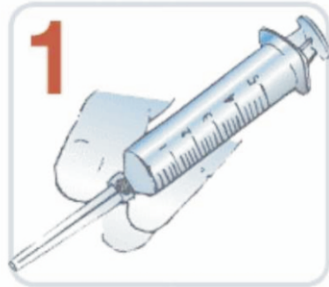

1 Távolítsa el a tűvédő hüvelyt!



2 Hagyományos módon szívja fel a gyógyszert!



3 Ha szükséges, juttasson levegőt az ampullába, de ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán.



4 A dugattyúszár teljes benyomásával fecskendezze be a gyógyszert.



5 Húzza vissza a dugattyúszárat, hogy a tűt biztonságosan a fecskendőhenger belsejébe juttassa.



6 Törje le a dugattyúszárat a törési pontnál, helyezze a belsejében lévő tűvel a veszélyes-hulladék tárolóba. A tűvédő hüvely, illetve a dugattyúszár letört része újrahasznosítható.

Distributed by:

SAFE GARD
Medical

Safegard Medical (Hungary) Kft.
3608 Farkaslyuk,
Jószerecsét tér 15.
HUNGARY

Tel.: +36 48 470 758

Fax: +36 48 474 798

e-mail: sales@safegardmedical.hu

www.safegardmedical.com