


DISGARD

Biztonsági tároló tálca éles eszközök számára

A DISGARD biztonsági tároló tálca biztosítja az éles orvosi eszközök - tűk, pengék- biztonságos gyűjtését és elhelyezését. A DISGARD biztonsági tároló tálca egy masszív, zárható, átlátszó műanyag tartó folyadékfelszívó betéttel és öntapadó réteggel ellátva a használt eszközök biztonságos tárolásához. A hátoldalon található ragasztófelület lehetővé teszi a beavatkozás közbeni rögzítést.

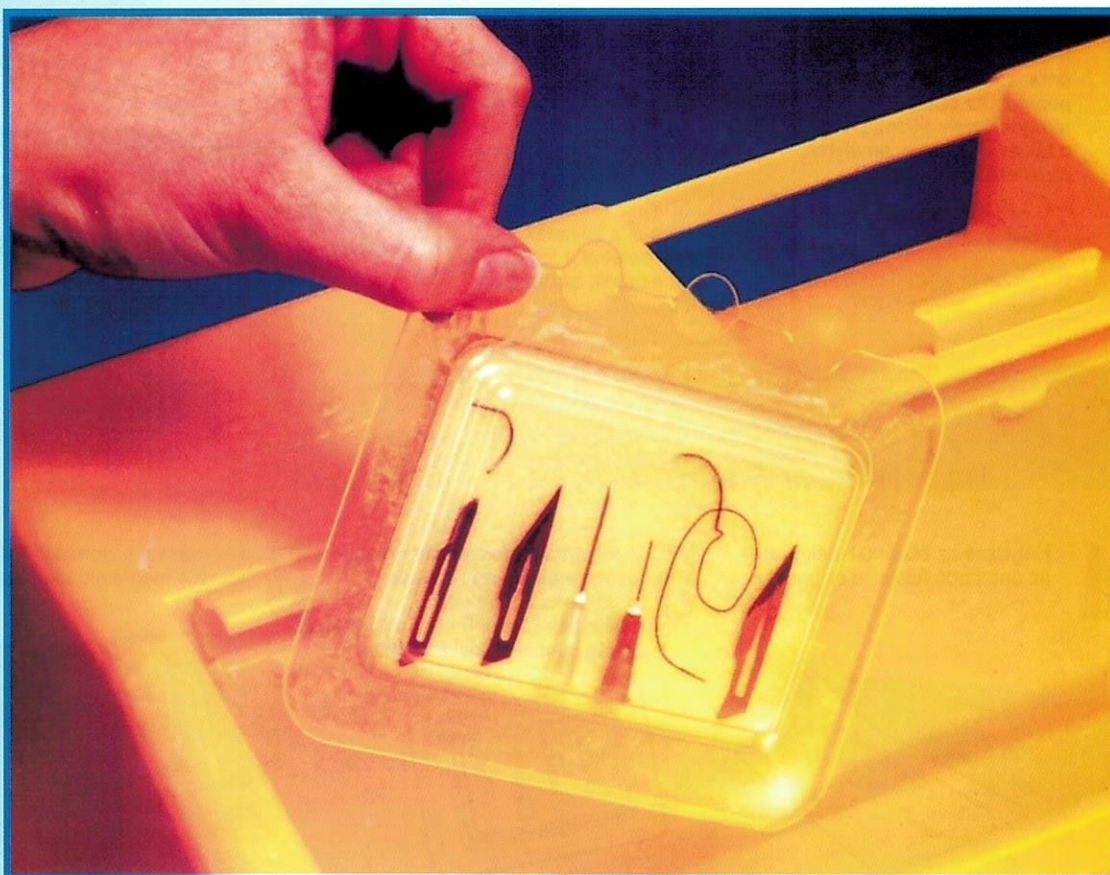

- Steril, egyszer - használatos eszköz
- Etilén-oxid gázzal sterilizálva
- Vizuálisan ellenőrizhető lezárás után is
- Masszív műanyag tálca, mely ellenáll szúrásnak, vágásnak
- Erős öntapadó réteggel ellátott felület, mely magán tartja az éles eszközöket a beavatkozás folyamata alatt
- A folyadékfelszívó betét biztosítja a folyadékok megtartását
- Gördülékennyé teszi az eszközök beavatkozás utáni ellenőrzését
- A különleges kialakítás nagyobb belső teret biztosít, mint egy ugyanilyen méretű tartótok, növelve ezáltal a ráfordítás hatékonyságát

SAFEGARD
Medical



Használati utasítás:

1

Rögzítse a biztonsági tároló tálcát a következő képpen: Húzza le a hátoldalon található öntapadó réteg fedőpapírját. Az öntapadó réteggel lefelé nyomja rá a tálcát a felületre, amelyhez rögzíteni szeretné.



2

Távolítsa el a folyadék-felszívó betétről a fedőpapírt, ezáltal előtűnik az öntapadó felület.




3

A biztonsági tároló tálca felhasználásra készen áll.



4

Helyezze az éles hulladékokat az öntapadó felületre csipesszel.

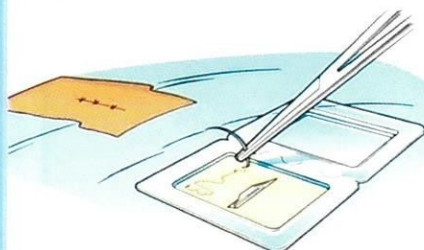


5

A folyamat befejezésekor hajtsa össze a tálcát, ami záráskor összetapad. Az átlátszó felületnek köszönhetően a tartalma zárás után is megszámlálható.



6

Helyezze a biztonsági tároló tálcát a megfelelő tárolóba.

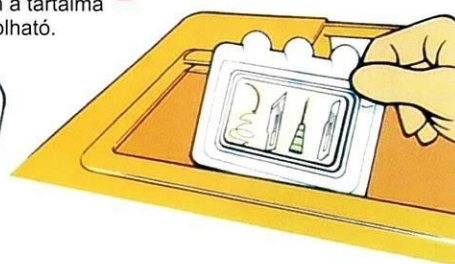

Gyártja:

Safegard Medical (Hungary) Kft.

3608 Farkaslyuk,

Jószerecsét tér 15.

HUNGARY

Tel.: +36-48/ 470-758

Fax: +36-48/ 474-798

e-mail: sales@safegardmedical.hu

www.safegardmedical.com